

IBUKI午睡チェック 画面説明

午睡チェックアプリ

目次

登録&設定	1
園児登録	2
保育園登録	3
各種設定	4
ヘルプ	5
午睡チェック①～③	6 - 8
寝姿勢チェック	9
体調チェック	10
データ管理	11

動作環境

iPad

iOS12以上

iPadOS13以上推奨



NO.	説明
①	午睡チェックをする園児を登録する画面へ移動
②	施設や先生を登録する画面へ移動
③	アラート音など各種設定画面へ移動
④	本画面マニュアルを開く
⑤	お問い合わせ画面へ移動
⑥	タイマーのON/OFF切替
⑦	メニュー



園児登録

NO.	説明
①	園児を登録できるブロックを追加
②	長押しで並び替え
③	園児の名前を入力
④	「午睡チェック」への表示/非表示の切替と表示の順番
⑤	不在/退園した園児の③・④の操作を不能にする
⑥	ブロックを削除
⑦	「登録&設定」へ戻る



NO.	説明
①	施設名を入力、午睡チェック表に反映
②	クラス名を入力、午睡チェック表に反映
③	先生の名前の頭文字を午睡チェック表に反映
④	有効にすると「午睡チェック」の確認者に選択可能



NO.	説明
①	各種設定メニュー



NO.	説明
①	お問い合わせ送信フォーム



午睡チェック①

NO.	説明
①	午睡チェック表に反映する天気を選択
②	「各種設定」 温湿度を自動入力。修正も可能 ※音質度自動入力機能はIBUKI ONE B非対応
③	温湿度に応じたインフルエンザ/熱中症アラート ※IBUKI ONE B非対応
④	「保育園登録」で登録した先生を4人まで選択
⑤	午睡チェック表に反映させる先生の名前をチェック
⑥	「各種設定」で定めた午睡チェック開始時間に戻る
⑦	現在の時間に戻る
⑧	「各種設定」で定めた午睡チェック間隔で分表示




NO.	説明
①	「園児登録」と連動するナンバー
②	「園児登録」と連動する名前
③	直近で検温した時間と体温
④	ベビーセンサーと連動時にステータスを表示
⑤	1分間の体動から推測された呼吸数（呼吸体動数）
⑥	約5秒間の呼吸体動波形 ※各種設定画面のリアルタイム表示がオンの時に表示されます。
⑦	感度を5段階で表示（感度1～5）※各種設定画面のリアルタイム表示がオンの時に表示されます。 タップすると1段階ずつ感度が上昇
⑧	ステータスの種類



NO.	説明
①	選択した寝姿勢
②	選択した体調
③	メモ記入時アイコン
④	検温入力時アイコン
⑤	寝姿勢チェック
⑥	体調チェック

① ↑	→	↑	↑	↑ ⑤	↑
④ +	③ +	+	+	+ ⑥	+
↑	↑	↑	→	↑	↑
+	+	② 咳 発熱 鼻水	+	+	+
←	↑	↑	←	←	↑
+	発熱 鼻水	+	咳	+	+

NO.	説明
①	寝姿勢選択
②	キャンセル
③	確認者変更

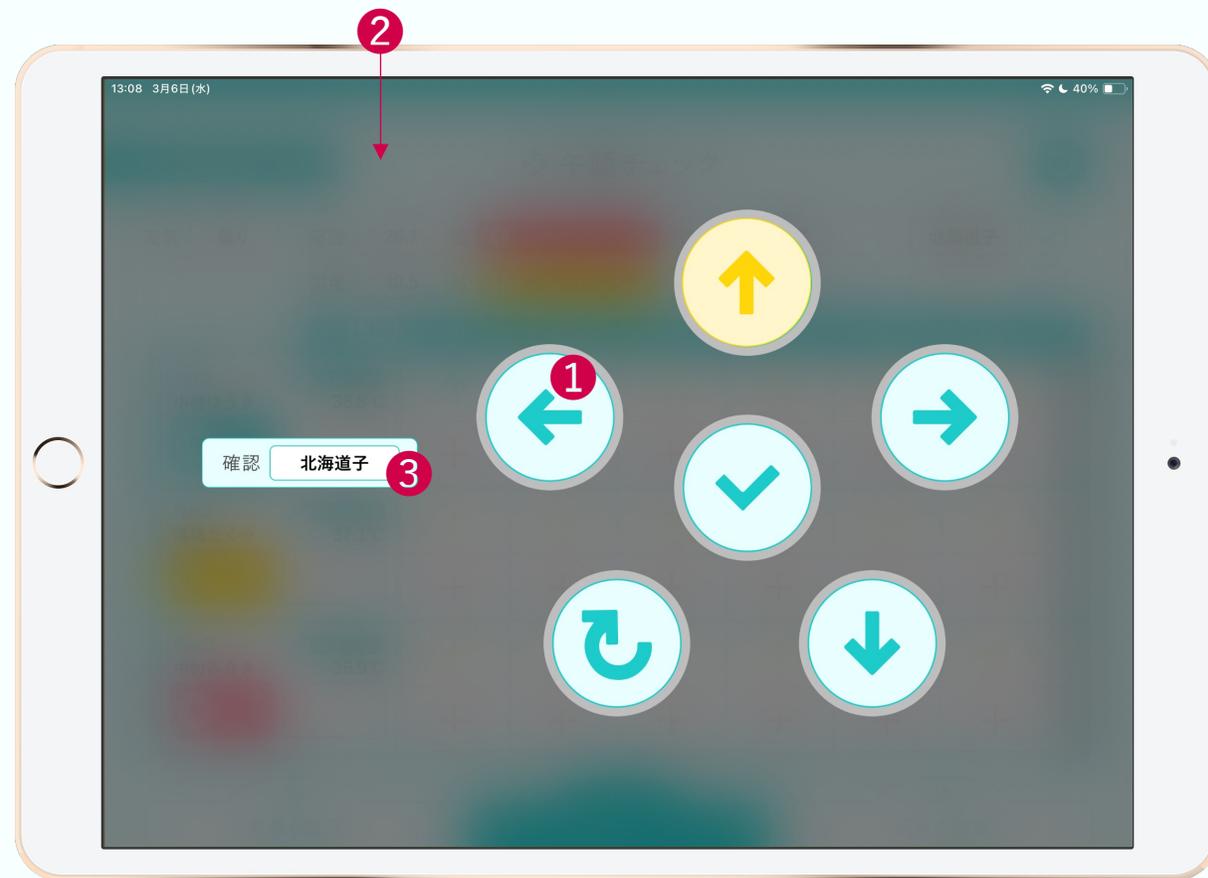

NO.	説明
①	体調選択（複数選択可能）
②	検温入力
③	メモ入力



NO.	説明
①	午睡チェック表を表示する日付の選択
②	表示している午睡チェック表の書出
③	保存・書出される午睡チェック表の確認画面

